

L'Ecran Lili

Guide de démarrage rapide

**Lisez moi
Pour lire
Vraiment**




Contenu de la boîte


1 L'écran Lili




2 Support + Socle

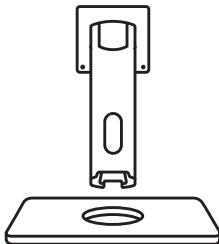


3 Vis

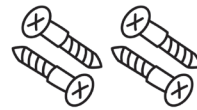


4 Adaptateur secteur 12 V + câbles EU / UK / US

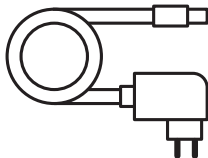

5 Câble HDMI

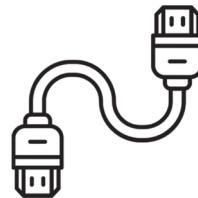

6 Câble USB-C

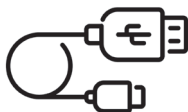


7 Ce guide




Installation de votre écran

1 Fixez le pied au socle

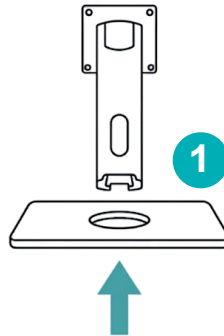


2 Fixez le pied à l'écran

Placez l'écran face vers le bas.
Utilisez les 4 vis fournies.

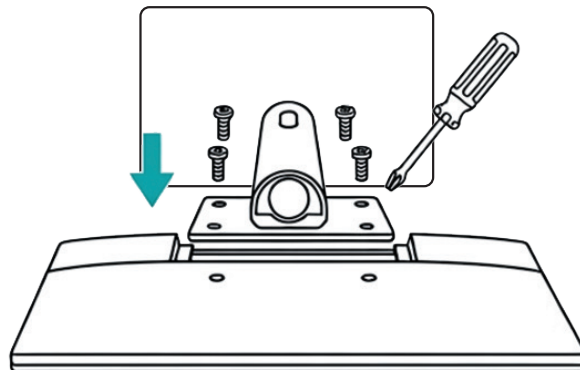

Connexion

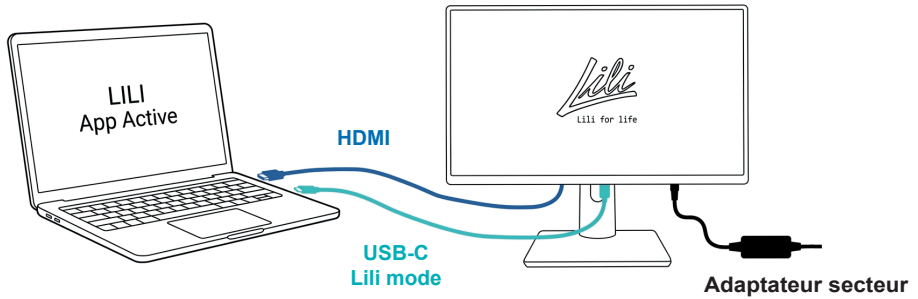

1

Adaptateur secteur

→ Prise murale

2

Câble HDMI

→ Selon votre ordinateur, un adaptateur peut être nécessaire (non inclus)

3

Câble USB-C


→ À connecter à votre ordinateur (active la technologie Lili)



Le câble USB-C active la technologie Lili.

Sans celui-ci, l'écran fonctionne mais sans le mode de lecture Lili.

Installez l'application Lili sur votre ordinateur

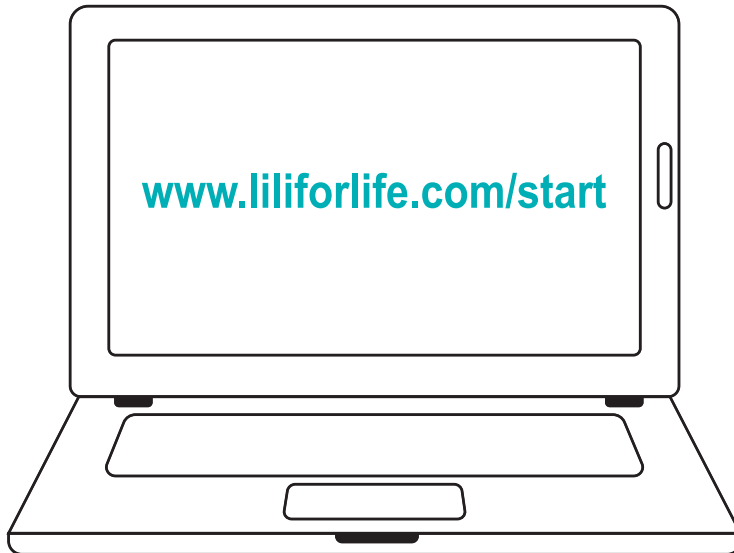


Téléchargez et installez.
L'application vous guide tout au long de l'installation.

Scannez le code QR pour accéder au tutoriel vidéo



Paramétrer l'application Lili

1 Activez le mode Lili

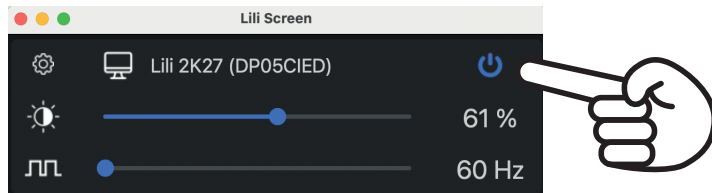

2 Ouvrez un document / une page web sur votre écran Lili pour personnaliser vos paramètres



3 Luminosité



Utilisez les flèches ↑ ↓ pour ajuster.
Trouvez un niveau confortable pour vos yeux.

Trouvez votre fréquence

3 étapes. 2 minutes. Votre écran s'adapte à vous.

1

Commencez



Appuyez sur ← pour atteindre 60 Hz.

L'écran scintille.

C'est normal.

2

Ajustez



Appuyez sur → lentement.

Arrêtez lorsque le scintillement disparaît.

C'est votre fréquence de base.

3

Lisez



Maintenant, lisez.

Appuyez sur → pour améliorer le confort.

Essayez différents niveaux à l'aide des flèches ← → pour ajuster la fréquence

Vérifiez que cela fonctionne



Désactivez Lili pour voir la différence.
Puis réactivez-le.

Bon à savoir



Chaque personne est différente.

Prenez le temps de trouver
votre réglage idéal.



L'effet peut apparaître progressivement sur plusieurs jours.

Utilisez l'écran pendant quelques jours
si vous ne ressentez pas l'effet immédiatement.



100 % des utilisateurs constatent une amélioration

de la vitesse, de la compréhension
ou une réduction de la fatigue.

Besoin d'aide ?

Dépannage



Pas d'image

- Vérifiez les câbles HDMI et/ou d'alimentation.
- Activez le mode étendu : Win+P (PC).




Fréquence grisée

- Appuyez sur le bouton ON/OFF
- sur l'écran d'abord.



Lili non détecté

- Rebranchez le câble USB-C.
- Redémarrez l'application Lili.

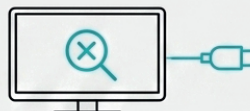

Besoin d'aide supplémentaire ? contact@liliforlife.com

Précautions :

- Utilisez uniquement les câbles et chargeurs fournis
- Utilisation en intérieur uniquement. 10–40 °C (50–104 °F)
- Nettoyez uniquement avec un chiffon humide. Aucun produit chimique.



Ne pas utiliser si vous êtes épileptique.

Mentions légales

Informations réglementaires

Produit : Lili Screen · Réf. : Lili 2K27 · Entrée : 12 VDC 4A

Fabricant UE : U Manufacturer:

Cet équipement est conforme aux exigences des directives européennes applicables. La déclaration complète de conformité est disponible sur demande.

LILI FOR LIFE

107 Allée François Mitterrand

76100 ROUEN, France

contact@liliforlife.com

Partie responsable aux États-Unis (FCC) :

Cet appareil est conforme aux règles de la FCC. (1) Il ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles. (2) Il doit accepter toute interférence reçue.

Americas Compliance Consulting LLC dba iCertifi

5809 US-2, Suite B, Albeni Plaza

Priest River, Idaho 83856, United States

+1 (866) 885-4575

Fccagent@icertifi.com



Mes réglages

Ma fréquence idéale :

..... Hz

Mon niveau de luminosité :

.....

Notes :

.....

.....

.....

.....

.....